

# Protocolo radiológico

Bio-réplicas para sector hospitalario

## 1. Preparación del paciente:

El paciente debe encontrarse correctamente colocado en la camilla del escáner y permanecer quieto durante la toma de las imágenes.




La zona que se desea reproducir en la bio-réplica debe quedar perfectamente comprendida en la exploración para evitar así futuras repeticiones de la toma.

## 2. Parámetros del TAC:

### TAC HELICOIDAL (CT):

- Sin inclinación de Gantry.
- Grosor de capa de entre 0,5 y 1,5 mm.
- Sin reconstrucción por software.

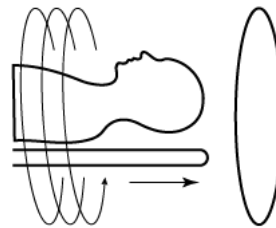

3. **Configuración de salida:** Los archivos de salida deben encontrarse en el formato estándar DICOM en forma de secuencia de archivos (uno por cada corte tomográfico axial).

IMG00000	IMG00005	IMG00010	IMG00015	IMG00020	IMG00025
IMG00001	IMG00006	IMG00011	IMG00016	IMG00021	IMG00026
IMG00002	IMG00007	IMG00012	IMG00017	IMG00022	IMG00027
IMG00003	IMG00008	IMG00013	IMG00018	IMG00023	IMG00028
IMG00004	IMG00009	IMG00014	IMG00019	IMG00024	IMG00029